



Entrenador muscular electromagnético de alta intensidad

MOLDEA Y **TONIFICA TU CUERPO**



CMSLIM es el estimulador muscular electromagnético más avanzado e intensivo.

El campo electromagnético enfocado atraviesa toda la piel y la grasa para estimular eficazmente el músculo, proporcionando las contracciones continuas más intensas que son ideales para el crecimiento muscular, y también inducen la apoptosis.

CMSLIM es un dispositivo HI-EMT diseñado para un propósito estético, con 2 (dos) aplicadores de mayor intensidad.

Su tecnología de vanguardia en el contorno corporal no invasivo se da ya que no sólo quema grasa, sino que también construye músculo.

Esta es la clave para un cuerpo tonificado y saludable.

Nueva tecnología para la tonificación muscular y moldeado corporal no invasivo




Dos aplicadores se colocan en el área muscular objetivo, como sus abdominales, muslos o gluteos. Los aplicadores luego generan electromagnético intenso que causa contracciones musculares involuntarias.

Dos aplicadores

Estas contracciones desencadenan la liberación de ácidos grasos libres, que descomponen los depósitos de grasa y aumentan el tono muscular y la fuerza.

Esto es muy similar a la forma de hacer ejercicio.


Al ejercitarse, la estimulación provoca la reconstrucción y reparación del tejido muscular, resultando en músculos más fuertes y firmes.

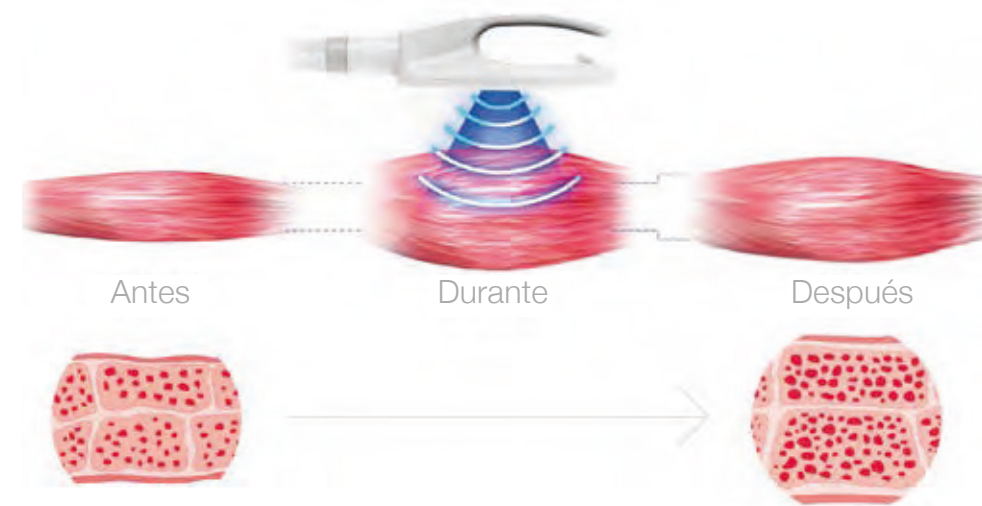

Tecnología médica no invasiva que se utiliza para fortalecer y reeducar los músculos mediante la interacción del campo magnético con el tejido del paciente.


Contrariamente a las contracciones musculares voluntarias, las contracciones supramáximas son independientes de la función cerebral.

El HI-EMT utiliza un rango específico de frecuencias que no permite la relajación muscular entre dos estimulaciones consecutivas.

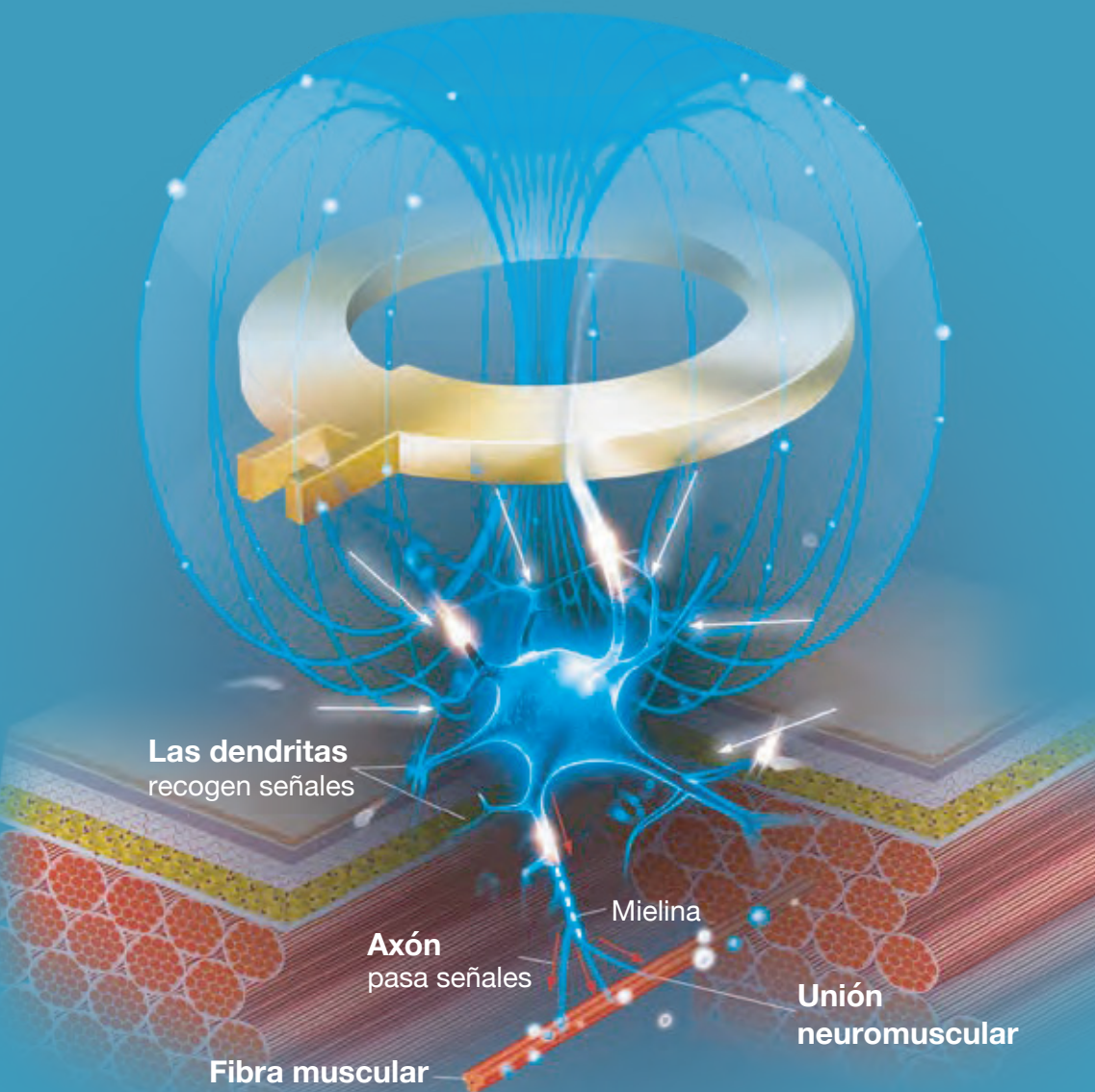

Tecnología probada

El HI-EMT utiliza un rango específico de frecuencias que no permite la relajación muscular entre dos estimulaciones consecutivas. El músculo se ve obligado a permanecer en estado de contracción durante varios segundos. Cuando se expone repetidamente a estas condiciones de alta carga el tejido muscular está estresado y se ve obligado a adaptarse.

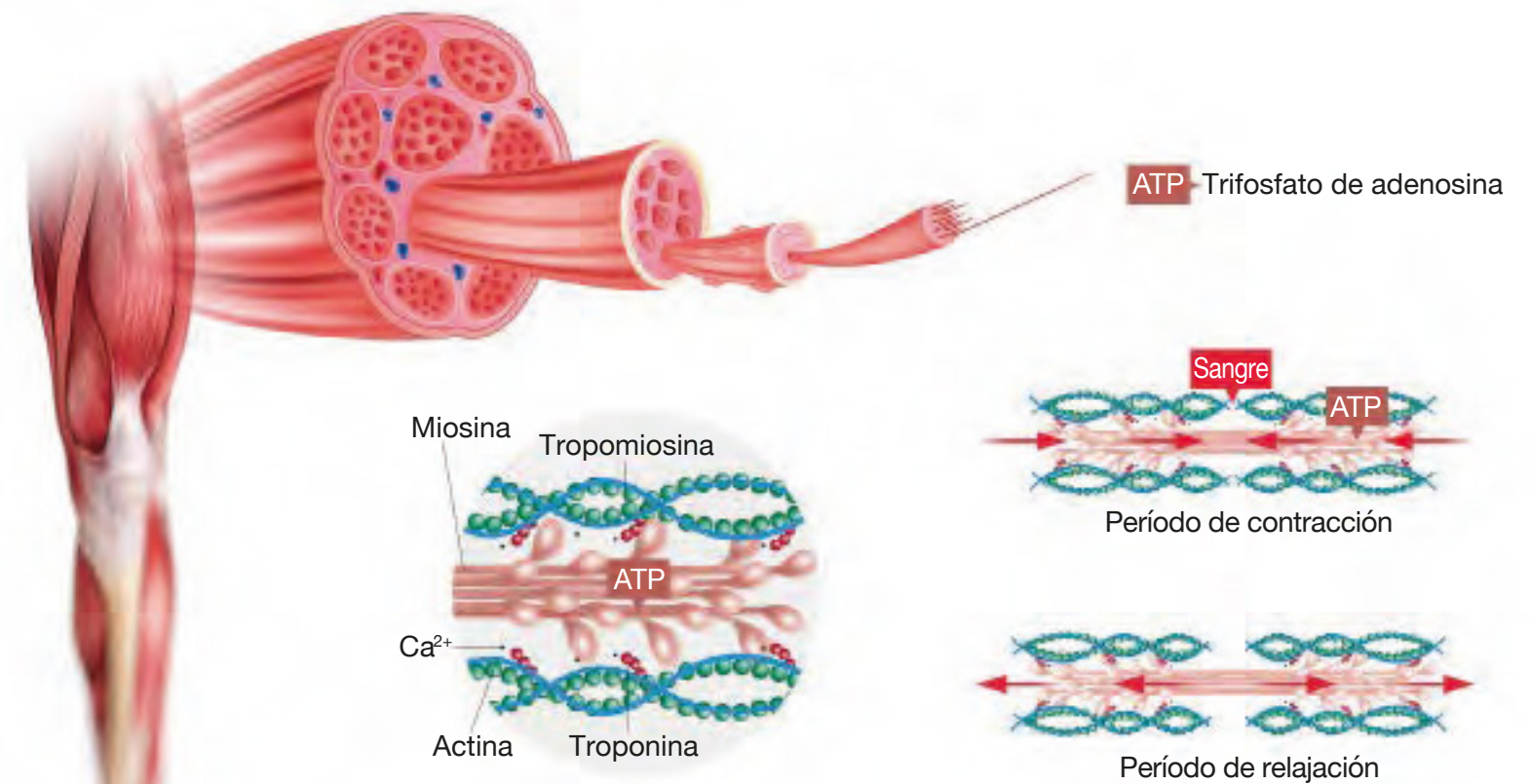

Los impulsos nerviosos desencadenan una reacción bioquímica que hace que la miosina se pegue a la actina

Mecanismo de la contracción del músculo

En estudios recientes se ha observado un aumento medio del 15% - 16% en el espesor del músculo abdominal en pacientes tratados a los dos meses de los tratamientos de HI-EMT.




HI-EMT

High Intensity Electromagnetic Muscle Trainer

(Entrenador Electromagnético de Alta Intensidad)

es la tecnología médica que se utiliza en la medicina estética. Utiliza campo electromagnético enfocado con un nivel de intensidad seguro.

El campo electromagnético pasa de forma no invasiva a través del cuerpo e interactúa con las neuronas motoras que posteriormente desencadenan contracciones musculares supramáximas. "HI-EMT se utiliza como un tratamiento de contorno del cuerpo no invasivo para el abdomen y los glúteos."

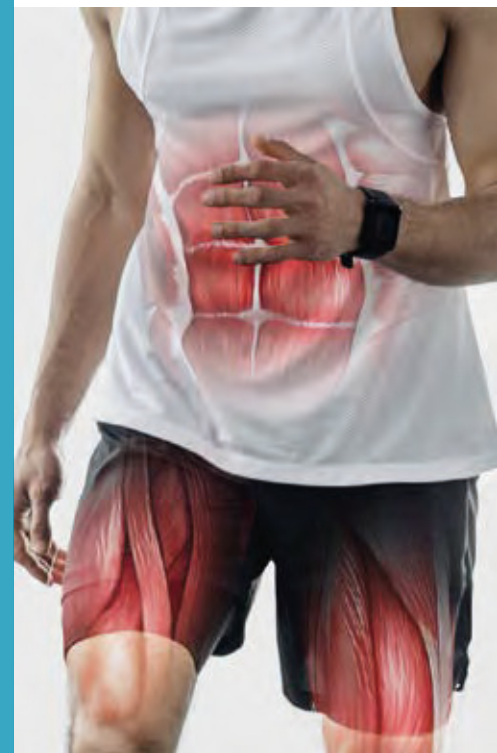

Efecto sobre la grasa. Varios estudios recientes que utilizan TC, RM y evaluaciones de ultrasonido han reportado aproximadamente una reducción del 19% en la capa de grasa subcutánea en pacientes tratados con dispositivo basado en HI-EMT en su abdomen. El principio de la apoptosis celular inducida por el aumento de las concentraciones de ácidos grasos libres se ha observado previamente y demostrado en numerosos estudios de investigación.

Información de la sesión

La sesión de tratamiento de CMSLIM no requiere anestesia, incisiones ni molestias. De hecho, los pacientes son capaces de sentarse y relajarse, mientras que el dispositivo realiza un equivalente de más de 20.000 crujidos indoloros o sentadillas.



Curso Hercules

Construcción muscular

Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Programa	Hipertrofia	Combo2	Hipertrofia	Combo2	Hipertrofia	Combo2

Curso David

Quemar grasa

Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Programa	HIIT	Combo1	Fuerza	Fuerza	HIIT	Combo1

Una sola sesión de tratamiento toma sólo 30 minutos, y no hay tiempo de inactividad. 2-3 tratamientos por semana, sería suficiente para un resultado perfecto para la mayoría de las personas. Generalmente, 4-6 tratamientos recomendados.



Programa de rutina de ejercicio

El programa de entrenamiento único de CMSLIM consiste en una serie de programa de preparación física real, que ha sido idealmente diseñado para una estimulación máxima que conduce al mejor resultado.

Curso Venus

Construcción muscular

Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Programa	Hipertrofia	HIIT	Combo2	Hipertrofia	HIIT	Combo2


Curso Aphrodite

Quemar grasa

Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Programa	HIIT	Combo 1	Fuerza	HIIT	Combo2	HIIT

Además, CMSLIM es un tratamiento extremadamente eficiente que tiene lugar en el transcurso de 10-14 días, en lugar de meses, y también produce unos abdominales más tonificados y glúteos tensos dentro de dos a cuatro semanas.

Si necesita más información sobre nuestro programa de entrenamiento, por favor visite www.emslim.club y háganos saber sus consultas.

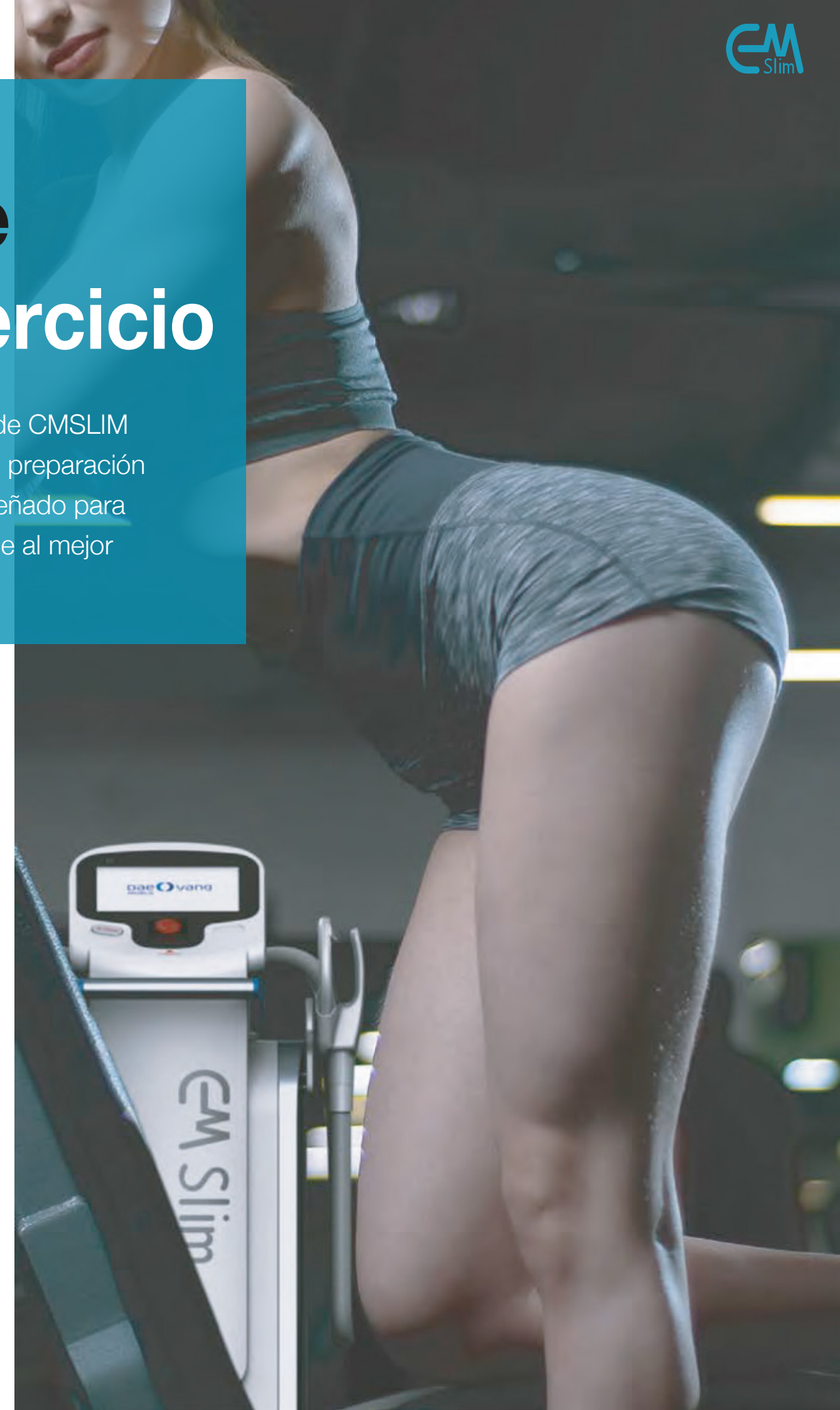

Ventajas del CMSLIM


Intensidad de salida

11 Tesla

La salida HI-EMT base 11 Tesla permite que la energía electromagnética pueda abarcar grandes músculos esqueléticos del cuerpo humano.

Eso significa que el proceso de reeducación muscular de CMSLIM es lo suficientemente profundo como la contracción muscular normal.

La estimulación muscular eléctrica superficial es incomparable.

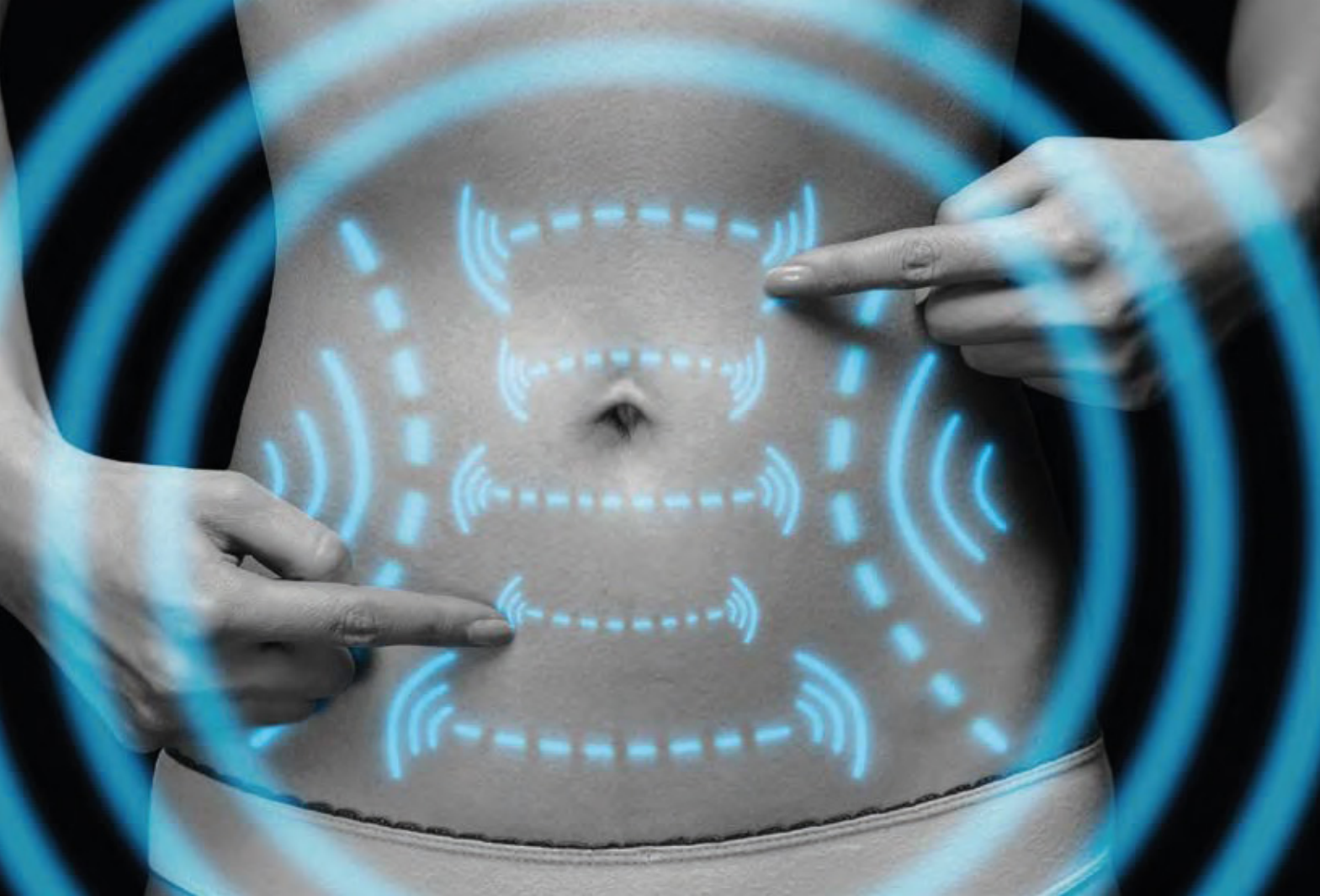


Tecnología de enfriamiento

Nuestro sistema de refrigeración por agua optimizado hace que CMSLIM sea muy eficaz para funcionar durante un tiempo muy largo sin ningún tiempo de inactividad. Aún más, ya no hay preocupaciones por fugas de aceites.



Entrenamiento manual

Nuestra tecnología de vanguardia permite ajustar el ancho del pulso electromagnético en un rango muy amplio. Para que no tenga que atenerse a unos pocos ajustes preestablecidos, puede diseñar un programa especial de tratamiento manual para las necesidades de su paciente.

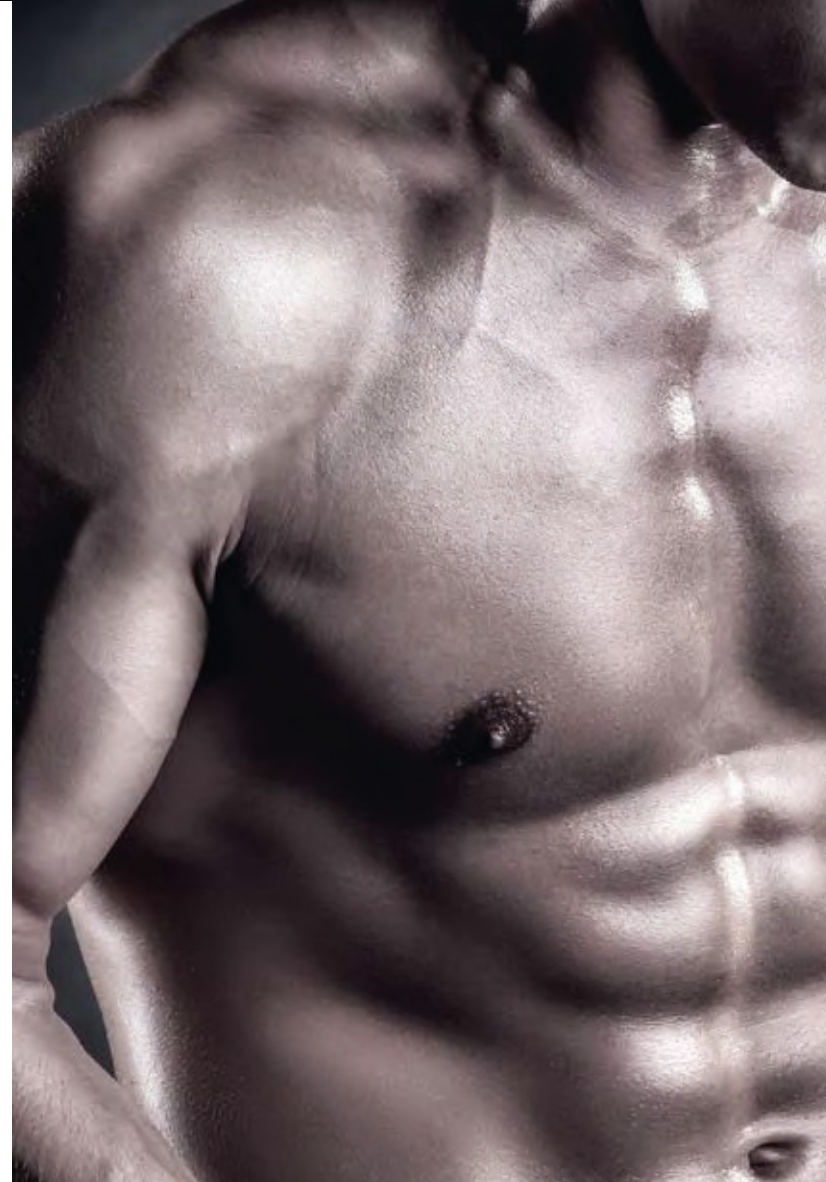



CMSLIM NO TIENE CONSUMIBLES



El sistema perfecto de enfriamiento por agua hace que CMSLIM sea más fiable y óptimo en la entrega de energía a lo largo de todo el tratamiento y actividad del día



11 Tesla. Para todo el cuerpo. El más potente del mercado que permite abarcar más grupos musculares o más grandes



1 año de garantía de cobertura completa



Operación conveniente - Interfaz de usuario y PRESET fácil y eficaz

Mantenimiento


Antes y Después

Incluso si usted no está en forma óptima, puede experimentar los beneficios de CMSLIM en los próximos años con ejercicio regular y alimentación equilibrada.




Frente-Antes-Masculino

Frente-Después-Masculino

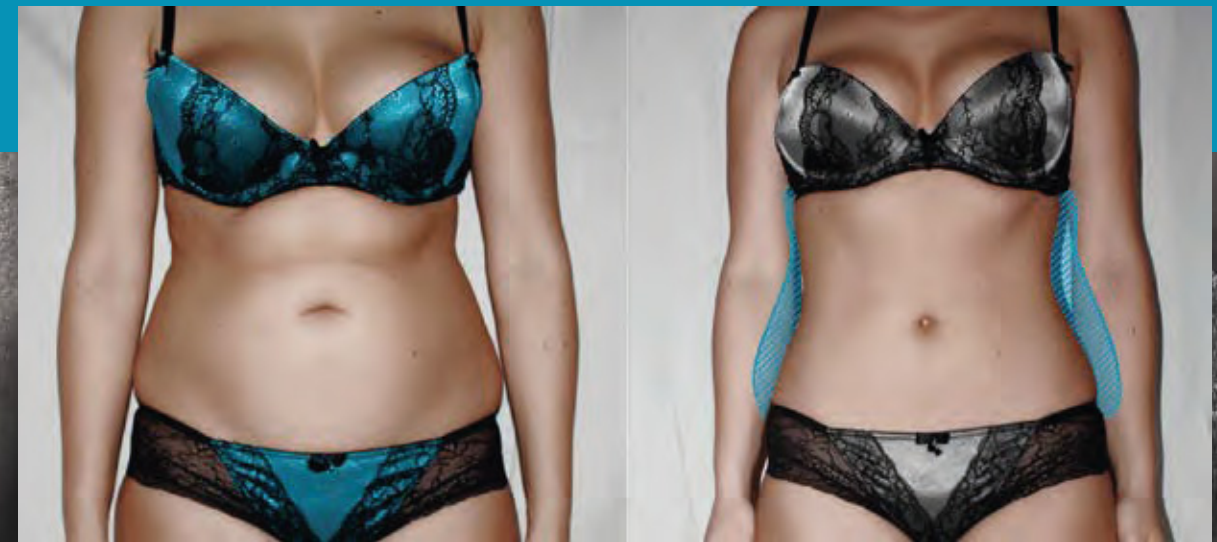

Frente- Antes- Femenino

Frente- Después- Femenino

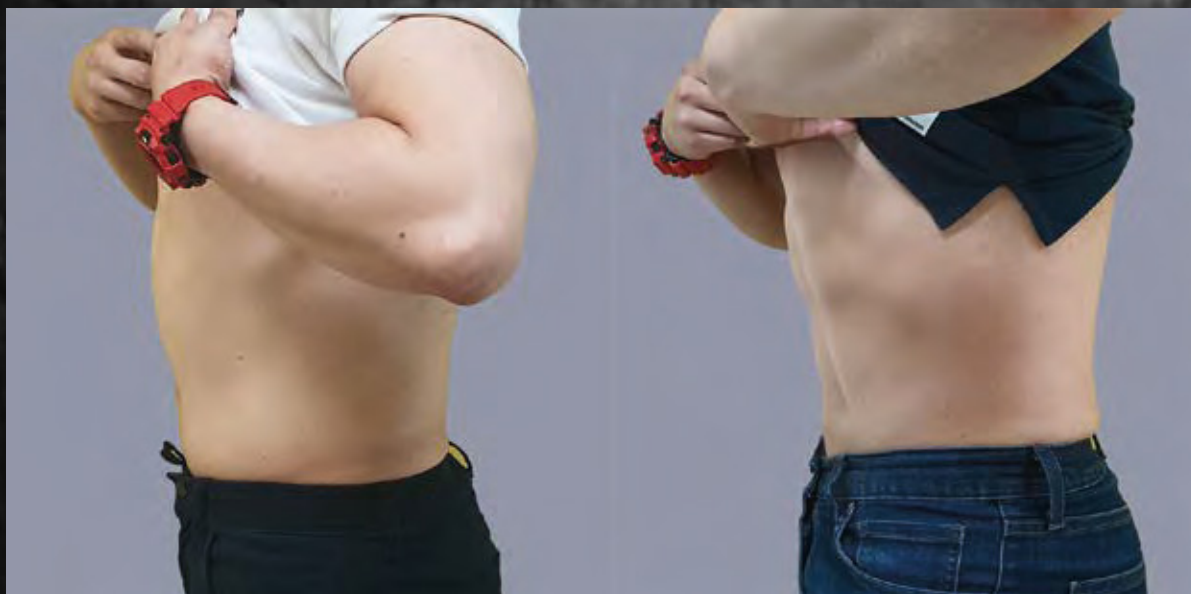

Frente-Antes-Masculino

Frente-Después-Masculino



Frente-Antes-Masculino

Frente-Después-Masculino

Preguntas frecuentes

Q ¿Un candidato?

A **Cualquiera y en cualquier grupo muscular del cuerpo**

Q ¿Tiempo de inactividad?

A **De ningún modo**

Q ¿Cuánto dura?

A **30 minutos por sesión**

Q ¿Con qué frecuencia?

A **2-3 veces por semana**

Q ¿Cuántas veces?

A **Se recomiendan de 4-6 tratamientos**

Q ¿Cuánto tiempo puedo usarlo?

A **Sin límite**

Q ¿Cuánto tiempo dura?

A **Mucho tiempo**

Q ¿Suministros adicionales?

A **No consumibles**

Q ¿Garantía?

A **1 año**

Q ¿Programa manual?

A **Modo manual fácil y efectivo**

- 1 LCD 2 Botón de paro de emergencia 3 Interruptor de reinicio 4 Aplicador (2EA)

Especificación

Potencia	Entrada de alimentación	230 V 50/60 Hz
	Máximo consumo de energía	2.3 kVA
Estimulación magnética	Amplitud de inducción magnética (intensidad)	0~11 Tesla
	Forma del pulso de estimulación	Biphase
	Duración del pulso	300 μs
Dimensión	Tamaño (altura x ancho x profundidad)	420 x 660 x 1150 (mm)
	Peso	70 kg
	Ttipo de seguridad	B
País de Origen	República de Corea	
Fabricante	DAEYANG MEDICAL CO., LTD	







Tecnología médica no invasiva

Para mayor confianza, trate la incontinencia

Capítulo

- ¿Qué es la incontinencia?
- ¿Por qué elegir CMSlim?
- ¿Quién puede usar CMSlim?

www.cmslim.com



1 de cada 2 mujeres padece incontinencia urinaria.



“Alrededor del **50 por ciento** de las mujeres estadounidenses tienen síntomas de incontinencia urinaria y cada año se gastan más de **\$ 10 mil millones** en tratamientos”.

En las mujeres, los embarazos previos, el parto y el inicio de la **menopausia** pueden provocar la incontinencia urinaria. A veces, la causa es desconocida. Es muy común en mujeres mayores.

¿Estás insegura/incómoda en este momento?



Problemas para trabajar



Ansiedad Depresión



Infección urológica

La mujer con incontinencia urinaria puede experimentar molestias físicas y mentales.

Por ejemplo, no solo sufre molestias físicas como daños en la piel e infecciones urológicas, sino que también puede sufrir de ansiedad, tensión, vergüenza y depresión.



Para mayor confianza, trate la incontinencia

¿Por qué CMSlim?



Para cualquiera



Contracción continua intensiva



No invasivo



Permanece completamente vestido



El tratamiento de Kegel y la estimulación del suelo pélvico tienen algunos problemas. El tratamiento de Kegel tiene el problema es que tenés que saber exactamente cómo hacer el ejercicio y hacerlo bien. La estimulación pélvica del suelo tiene la dificultad de adquirir dispositivos y de insertarlos.



Teniendo en cuenta estos problemas, **CMSlim pone la comodidad del paciente primero**. Siéntese y relájese. No necesita quitarse la ropa ni mover su cuerpo.

Durante el tratamiento, CMSlim realiza contracciones continuas intensivas para fortalecer y reciclar los músculos del paciente.

Método de tratamiento CMSlim




Antes

Músculos del suelo pélvico debilitados por capas de envejecimiento y por el medio ambiente.



Tratamiento

Estimula los músculos del suelo pélvico a través de una contracción continua intensiva.

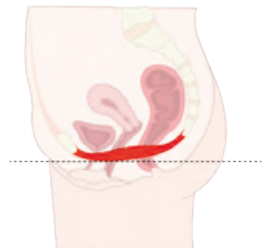

Después

Los músculos contraídos restauran la vejiga para que funcione correctamente.

Espere un segundo... ¿Usted...

- ☐ gotea cuando tose o estornuda?
- ☐ gotea cuando realiza ejercicio o levanta algo pesado?
- ☐ gotea después del parto y la menopausia?
- ☐ gotea después de tener sobrepeso?
- ☐ tiene trastorno del sueño causado por una vejiga debilitada?
- ☐ **tiene dificultad para insertar la estimulación del suelo pélvico?**
- ☐ quiere otro tratamiento que no sea los ejercicios Kegel o realizar dietas?



Para tu mamá, papá y para ti

CMSlim es la mejor solución para todas las mujeres que quieren resolver problemas de incontinencia urinaria y tener una mejor calidad de vida. Después de iniciar el tratamiento con CMSlim. La experiencia en las contracciones musculares del suelo pélvico por las intensas electromagnéticas que se producen en los aplicadores te hará sentir que tu calidad de vida mejora. No importa si eres hombre o mujer, si eres joven o viejo. Todo el mundo puede usar CMSlim. Todos merecen recuperar la confianza.



daeOyang



TECNOIMAGEN
www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-22223