

LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA

PARA LOS DESAFÍOS ESTÉTICOS




VENUSLEGACY



VENUS LEGACY

Es un dispositivo médico no invasivo de alta tecnología que soluciona eficazmente los desafíos que encuentras en las diferentes necesidades estéticas enfocadas en el rostro y el cuerpo, como la reducción no quirúrgica de la celulitis y la disminución de las arrugas. Los tratamientos son cómodos y los pacientes no requieren tiempo de inactividad, además es seguro para todo tipo de piel. Venus Legacy™ funciona sobre su plataforma (MP)² y su tecnología de vanguardia, VariPulse™, encargada de mejorar los efectos de la lipólisis de la energía RF, aumentando la circulación sanguínea y estimulando el drenaje linfático.

TRATAMIENTOS NO INVASIVOS PARA NECESIDADES DESAFIANTES

Venus Legacy™ disminuye la celulitis y minimiza las arrugas, lo cual se traduce en una piel tersa y firme del rostro y del cuerpo.

AVANZADA TECNOLOGÍA PARA RESULTADOS VISIBLES

La tecnología de vanguardia, VariPulse™, con mecanismos de succión y enfriamiento de la piel, además de una completa información térmica en tiempo real, garantiza la máxima comodidad del paciente con resultados clínicos predecibles.

CÓMODO, SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD Y SEGURO PARA TODO TIPO DE PIEL

La tecnología de radiofrecuencia (RF) ha comprobado ser segura para todo tipo de piel. Los tratamientos son cómodos y los pacientes no requieren tiempo de inactividad.

MAYOR RETORNO DE SU INVERSIÓN

El modelo de negocio único de Venus Concept asegura un bajo riesgo con un mayor retorno de inversión.



TECNOLOGÍA (MP)²

Venus Legacy™ usa su tecnología patentada (MP)², la cual combina de manera sinérgica la Radiofrecuencia (RF) Multipolar y los Campos Electromagnéticos Pulsados (PEMF).

RADIOFRECUENCIA MULTIPOLAR




La Radiofrecuencia (RF) Multipolar utiliza un complejo algoritmo para aplicar calentamiento más homogéneo en diferentes profundidades del tejido, permitiendo una acumulación rápida de calor y facilitando el mantenimiento de una temperatura terapéutica ideal. Esto se traduce en una mayor eficacia y seguridad para el paciente. Sin picos de calor, no hay necesidad de agentes tópicos de enfriamiento lo que hace que los pacientes reciban una experiencia de tratamiento agradable e indolora.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PULSADOS (PEMF)

El efecto de Radiofrecuencia (RF) Multipolar es mejorado por los Campos Electromagnéticos Pulsados (PEMF), una tecnología no térmica emitida a través de los electrodos del aplicador. Los PEMF han demostrado ser eficaces en la activación de los procesos regenerativos en la piel y han sido usados en la medicina convencional durante décadas.

EFFECTO SINÉRGICO DE LA RADIOFRECUENCIA (RF) MULTIPOLAR Y PEMF

(MP)² incrementa sinérgicamente la producción de colágeno por medio de dos mecanismos independientes, Radiofrecuencia Multipolar (térmico) y PEMF (no-térmico). La radiofrecuencia estimula directamente los fibroblastos, mientras los PEMF inducen a la proliferación de fibroblastos y producen nuevo colágeno mediante la liberación de FGF-2. Juntos, trabajan para incrementar la síntesis del colágeno. (MP)² está comprobado en la remodelación eficaz del colágeno, suavizando las arrugas y tensando la piel. También es efectivo en la creación de nuevos capilares, que renuevan el suministro de sangre.

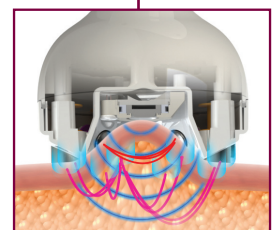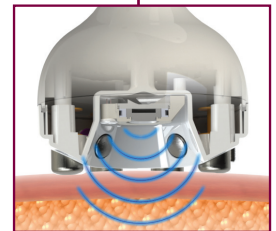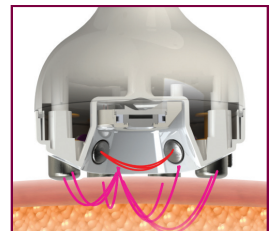

APLICADORES

Venus Legacy™ cuenta con 4 aplicadores: OctiPolar™ y Corporal 4D para zonas grandes, DiamondPolar™ y Facial 4D para las zonas más pequeñas. Estos cuatro aplicadores ergonómicamente diseñados y livianos son respaldados por la tecnología patentada (MP)². Los aplicadores OctiPolar™ y DiamondPolar™ están sugeridos para tratamientos de reducción de arrugas y del tensado de la piel. Los aplicadores Corporal 4D y Facial 4D están equipados con la nueva tecnología VariPulse™, los cuales los hacen más efectivos para la reducción de la celulitis.

APLICADOR DIAMONDPOLAR™



APLICADOR OCTIPOLAR™



APLICADOR CORPORAL 4D

El aplicador Corporal 4D está diseñado con una matriz energética multidimensional de RF y PEMF para una mejor concentración en áreas de tratamiento específicas desde diferentes direcciones y posiciones, estimulando el desglose de la grasa e induciendo la reducción de la celulitis. Tiene un **diseño innovador de corona doble multipolar de electrodos**, donde la corona plana externa controla constantemente el calentamiento volumétrico electro-térmico, mientras que la corona tetrapolar profunda interna proporciona un calentamiento electro-térmico selectivo de succión asistida. La matriz única de 8 electrodos, con una distancia de separación de hasta 7.5 cm, abarca **zonas más amplias** lo que permite que los tratamientos sean más rápidos. Esta distancia, combinada con la tecnología VariPulse™, ofrece una **profundidad de penetración de hasta 4.5 cm** para un mayor efecto sobre la grasa, proporcionando así los mejores resultados posibles.



APLICADOR FACIAL 4D

El aplicador Facial 4D posee todas las características tecnológicas y beneficios del aplicador Corporal 4D, pero en una configuración más pequeña. Está diseñado para acceder y tratar zonas más pequeñas del cuerpo difíciles de alcanzar, como alrededor de los pómulos y el cuello.





¿POR QUÉ **VENUS LEGACY** ES LA

LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA PARA LOS DESAFÍOS ESTÉTICOS?

TECNOLOGÍA VARIPULSE™




Venus Legacy™ es el único dispositivo en la industria de la medicina estética con tecnología avanzada VariPulse™, la cual viene integrada directamente en sus aplicadores: Corporal 4D y Facial 4D. **VariPulse™ emite impulsos de succión ajustable que facilitan una penetración profunda de la energía.** La presión positiva y negativa del aire, contribuye a la contracción de los tejidos sub-dérmicos y adiposos, contribuyendo a la reducción temporal de la apariencia de la celulitis. La energía RF induce la lipólisis, reduciendo la celulitis y mejorando la apariencia de la piel. VariPulse™ potencia la penetración y los efectos de la energía RF, mejorando el contacto con la superficie entre los electrodos y el tejido, aprovechando de esta manera el acoplamiento RF y el suministro de calor. VariPulse™ también es efectivo en el aumento del flujo sanguíneo y el mejoramiento del drenaje linfático.

La tecnología VariPulse™ es lo que permite a Venus Legacy™ tratar con eficacia los desafíos más grandes que se presentan en la estética, como los depósitos de grasa localizados y la celulitis.

Con los mecanismos de succión y enfriamiento de la piel que ofrece VariPulse™, el operador puede alcanzar temperaturas más altas y terapéuticamente más efectivas en tiempo más reducido y mantenerlas de manera controlada durante toda la sesión (especialmente en las áreas más grandes del cuerpo). Esta innovadora tecnología garantiza la máxima comodidad del paciente y produce excelentes resultados clínicos.

RETROALIMENTACIÓN TÉRMICA EN TIEMPO REAL

Los cuatro aplicadores están equipados con sensores integrados que proveen información de la temperatura en tiempo real, permitiendo un **fácil y rápido monitoreo de los efectos inmediatos sobre la piel, durante todo el tratamiento.** Esta particularidad hace que Venus Legacy™ sea muy simple y confiable de usar, con características importantes que incrementan la seguridad y la comodidad del paciente, produciendo resultados clínicos más consistentes y predecibles.

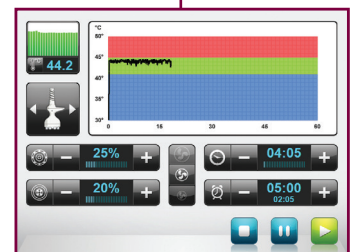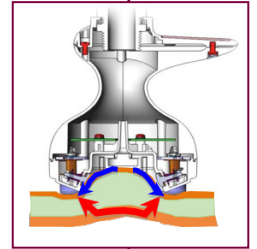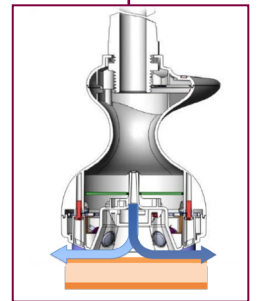

EXPERIMENTE

LOS RESULTADOS



Cortesía de Synergy Aesthetics and Wellness
Resultados después de 10 tratamientos



Cortesía de Venus Concept
Resultados después de 8 tratamientos




Cortesía de Younger Body MediSpa
Resultados después de 5 tratamientos



Cortesía de Martin Ray, MD
Resultados después de 8 tratamientos



Cortesía de Gitit Zucker, MD
Resultados después de 10 tratamientos

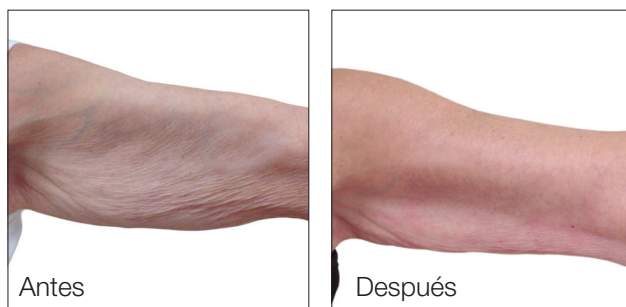


Cortesía de Beach Grove Laser
Resultados después de 5 tratamientos

UNA ALIANZA QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

Cuando usted elige Venus Legacy™, se está asociando con Venus Concept. Nuestro modelo de negocio único en la industria, está diseñado para incrementar aún más el éxito de su negocio.

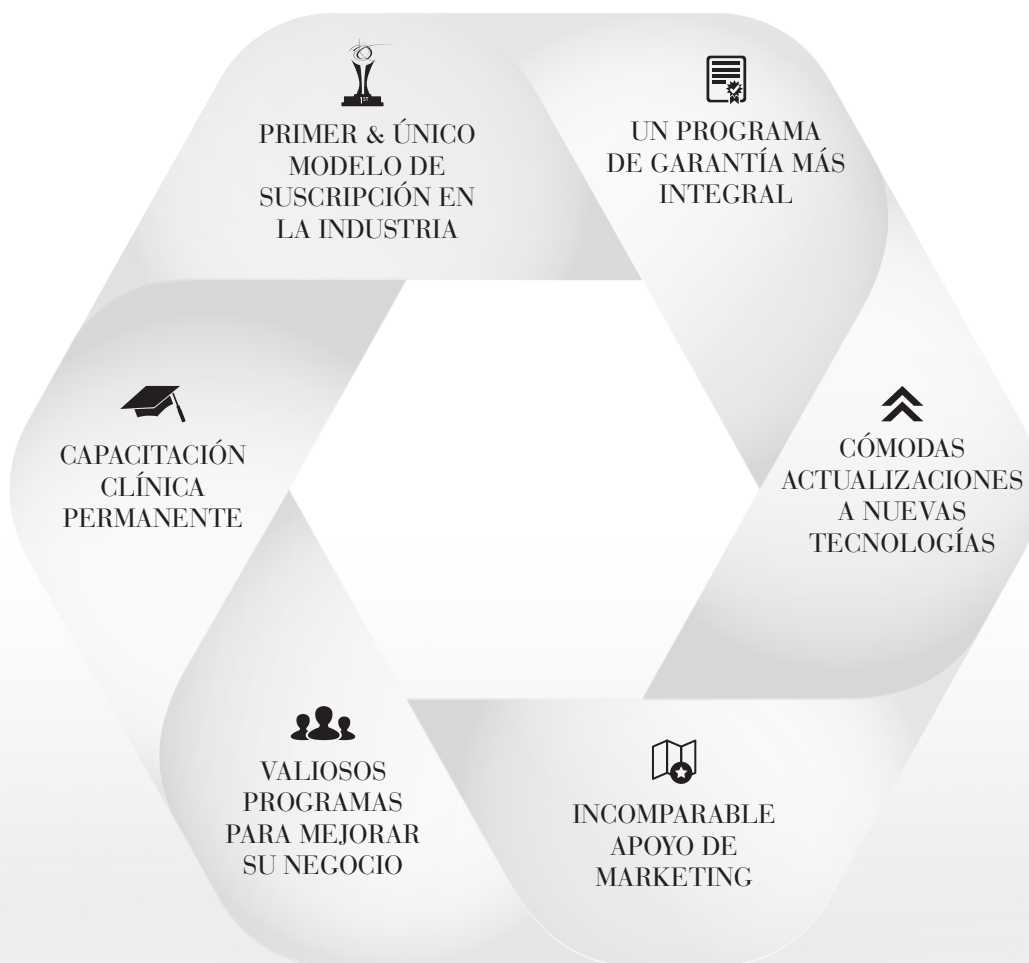

UNA ALIANZA QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

Con el modelo de negocio único de Venus Concept,
Venus Legacy™ asegura un alto retorno de su inversión.



PRIMER & ÚNICO MODELO DE SUSCRIPCIÓN EN LA INDUSTRIA

Plan de pago completamente personalizable que satisface las necesidades de su negocio

Plan de pago en pesos sin intereses

Planes de pago personalizados

Sin verificación de crédito ni costos de financiamiento

Propiedad total después de completar la suscripción



UN PROGRAMA DE GARANTÍA MÁS INTEGRAL

Garantía líder en la industria, diseñada especialmente para proteger contra fallas imprevistas en la tecnología durante todo el período de vigencia de su contrato

Soporte telefónico y solución de problemas

Respuesta en 24 horas

Soporte técnico de expertos



ACTUALIZACIONES FÁCILES A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actualizaciones fáciles a nuevas tecnologías y descargas de software gratuitas

Transfiera sus pagos y actualice a medio contrato

Acceso rápido y fácil a tecnologías más modernas

Evita la obsolescencia tecnológica



VALIOSOS PROGRAMAS PARA MEJORAR SU NEGOCIO

Programas de mejora para proporcionar soporte continuo para todos los aspectos de su negocio

Expertos en marketing a su servicio

Estrategias de desarrollo de negocio

Apoyo de marketing para su clínica



INCOMPARABLE APOYO DE MARKETING

El único equipo de marketing interno para ayudarle a promocionar su dispositivo de Venus Concept

Publicidad personalizada para su negocio

Herramientas para la educación del paciente

Perfil personalizado a su negocio en nuestro Buscador de Clínicas



CAPACITACIÓN CLÍNICA PERMANENTE

Educación y apoyo clínico disponibles cuando lo necesite

Acceso 24/7 a capacitación clínica avanzada



Programas educativos permanentes de nuevas técnicas y protocolos de tratamientos

Educación liderada por un equipo de expertos

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	100/120/240V~, 670 VA, 50/60 Hz
Frecuencia de salida RF	1 MHz
Fusible	T10A, 250V
Max. potencia de salida RF	Hasta 150 vatios
Aplicadores (MP) ²	Aplicador DiamondPolar™ con termómetro integrado
	Aplicador OctiPolar™ con termómetro integrado
	Aplicador 4D Facial con termómetro integrado (4 niveles de succión)
	Aplicador 4D Corporal con termómetro integrado (4 niveles de succión)
Voltaje de salida	Hasta 130V @ carga nominal
Frecuencia de pulso magnético	15 Hz
Campo magnético	Hasta 15 Gauss
Dimensiones	40 cm x 40 cm x 100 cm / 15.75 in x 15.75 in x 39.37 in (D x W x H)
Peso	40 kg / 88.2 lb

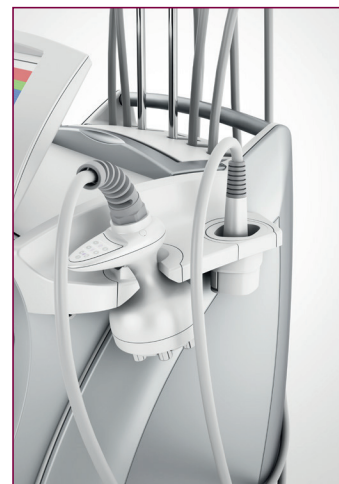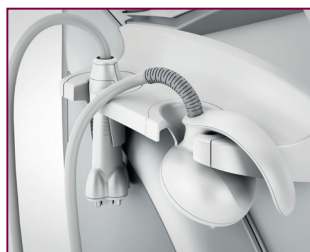

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222